

수의사용 리플렛

동물용 의료기기



ROYAL CANIN®

HEMATURIA DETECTION

technology by

blücare®

고양이의 혈뇨에서 적혈구를 검출하기 위한 체외진단 의료기기

로얄캐닌 헤마츄리아 디텍션 바이 블루케어





HEMATURIA DETECTION

technology by



FLUTD(하부요로계질환) 추적 관리를 위한 체외진단 의료기기

FLUTD(하부요로계질환) 증상은
추적관찰이 어렵습니다.

FLUTD는 재발이 잦습니다.



재발의 초기 발견으로 까다롭고
고통스러운 합병증을 방지할 수
있습니다.

보호자들은 반려묘의
건강 상태에 대해 항상 염려합니다.



하지만 가정에서 추적 관리
할 수 있는 적절한 도구를
갖고 있지 못합니다.

반려묘는 증상을 숨기는 경우가 많습니다.



따라서 건강 문제의
조기 발견이 쉽지 않습니다.

혈뇨는 대부분의 FLUTD를 시사하는
강력한 지표입니다.



1. 조기 발견을 통해 중증 질환으로
진행되는 것을 막을 수 있습니다.
2. 병원 치료가 늦는 경우 심각한
질병으로 진행되고 합병증이
발생할 수 있습니다.

혈뇨 발견을 위한
혁신적인 도구



로얄캐닌 헤마추리아 디텍션
바이 블루케어는 반려묘의 혈뇨를
조기에 발견해 요로계 건강 관리를
도와주는 도구입니다.

제품 구성

- 시약이 포함된 백색의 과립으로 혈액과 접촉하면 **파란색으로 변합니다.**



사용 시기

- 로얄캐닌 헤마추리아 디텍션 바이 블루케어는 가정에서 손쉽게 사용해 요로계 질환 발생을 조기에 발견할 수 있는 도구입니다.



사용 방법

간편한 4단계 시험

- 

1 화장실에 헤마추리아 디텍션 1포(20g)를 모래 위에 고루 뿌려줍니다.
 - 

2 반려묘가 소변을 본 후 화장실을 살펴봅니다.
 - 

3 입자가 흰색인 경우 결과는 음성입니다.
 - 

4 입자가 청색인 경우 결과는 양성입니다. 즉, 반려묘의 소변에 혈액이 포함되어 있음을 의미합니다.
- 과립의 색상 변화에 따라 수의사와 상담합니다.

혈뇨 발견을 위한 즉각 대응

합병증의 위험 최소화

로얄캐닌 헤마츄리아 디텍션 바이 블뤼케어는 재발의 조기 발견을 위한 간편한 모니터링과 편리한 추적 관리로 반려묘의 건강을 지키고 수의사의 업무를 보조하는 도구로 개발되었습니다.

ROYAL CANIN® HEMATURIA DETECTION BY BLÜCARE



반려묘

- 스트레스 없는 환경에서 혈액 검출 검사를 실시할 수 있습니다.
- 화장실이나 환경에 변화를 줄 필요가 없습니다.
- 혈뇨 조기 발견을 통해 증상 악화를 방지하는데 도움을 줍니다.



보호자

- 반려묘의 요로계 건강을 모니터링 할 수 있습니다.
- 수의사와의 상담이 필요한지 판단 하는 데 도움을 줍니다.
- 혈뇨 조기 발견을 통해 질병 진행에 따른 합병증을 방지하는 데 도움을 줍니다.



수의사

- 환자가 질병 초기 단계에서 병원을 찾아올 확률이 높아집니다.
- 보호자에게 더 나은 서비스를 제공하고 관계를 강화할 수 있습니다.
- 보호자에게 절차와 사용법을 매우 간단하게 설명할 수 있습니다.
- 수의사의 지시에 대한 보호자의 순응도를 높이는 데 도움을 줍니다.
- 병원 수익 증대에 기여합니다.

분명한 이점



편리성

화장실 모래에 뿌려 손쉽게 사용할 수 있는 과립형 제품입니다.*



신속성

수 초 이내에 결과가 나타납니다.



눈으로 확인 가능

결과를 48시간 동안 눈으로 확인할 수 있습니다.



스트레스 없는 검사



안전성

안전한 성분으로 만들어졌습니다.



차별성

Blücare 기술로 실현한 혁신적 제품입니다.



신뢰성

미세혈뇨 검출에 도움을 줍니다.



편리한 보관

20g x 2팩 구성으로 보관이 편리합니다.